

類別:機械器具81 磁気治療器

管理医療機器

一般の名称:家庭用電気磁気治療器(71015000)

販売名

マグスピンM-1 NEO

**【警告】**

「併用医療機器」

次のような医用電気機器との併用は、影響を与える可能性がありますので、使用しないでください。

・ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。


[誤作動をおこすおそれがあります。]

・脳せき(脊)髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき(脊)髄液を腹くう(腔)にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき(脊)髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

[誤作動をおこすおそれがあります。]

**【形状・構造及び原理等】**

〈各部の名称及び働き〉

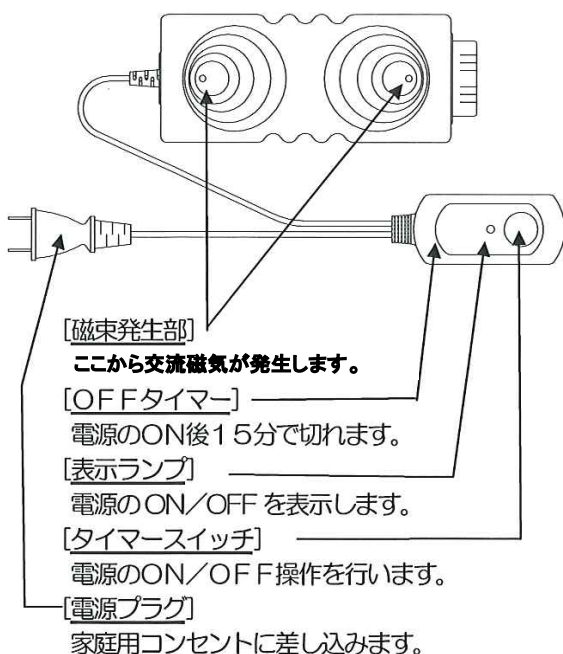

〈付属品の名称〉

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| (1) 本体カバー (オプション)        | 1個 |
| (2) テスターシート (オプション)      | 1個 |
| (3) テスターシート止めバンド (オプション) | 1個 |
| (4) 専用ケース (オプション)        | 1個 |
| (5) 専用ケース止めバンド (オプション)   | 1個 |
| (6) 取扱説明書                | 1個 |

〈動作原理〉

鉄心上に巻いた巻線に交流電流を通電することにより、両磁極間の空間に交流磁束流を発生させ、患部に磁束流を注ぐことにより治療効果を与える磁気治療器である。安全装置として15分電子タイマーが電源コードの中間に配置され、温度制御回路、温度ヒューズが磁気発生部に内蔵されている。

**【使用目的又は効果】**

装着部位のこり及び血行の改善。  
一般家庭で使用すること。

**【使用方法等】**

- 電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。
- 本体の表面を治療したい患部に当てます。
- タイマースイッチを「入」にして、電源を入れます。OFFタイマーの表示ランプが点灯し、治療を開始します。
  - ※ 磁気が発生していることを確認したい時は、付属のテスターシートで行います。治療のじゃまにならない部分にテスターシート止めバンドで、テスターシートを固定してください。振動により磁気発生を知らせます。
  - ※ 専用ケースや本体カバーに入れたままでも使用できます。又、専用ケースには専用ケース止めバンドが付いていますので、使用部位に固定してお使いになれます。
- 電源スイッチON後15分でタイマーは切れます。OFFタイマーの表示ランプが消灯し、治療を終了します。
  - ※ 続けて他の部位を治療する時は、一旦タイマースイッチを「切」にしてから入れ直してください。
- 使用後は、必ずタイマースイッチを「切」にして、電源プラグを家庭用コンセントから抜いてください。
  - ※ 治療を途中で中止する場合は、タイマースイッチを「切」にしてください。

**【使用上の注意】**

〈使用環境、使用条件〉

- ・浴室などの湿度の高いところでは使用しないでください。
- ・AC100V以外では使用しないでください。
- ・使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家にご相談ください。
- ・同梱されている、付属品以外は使用しないでください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

〈併用医療機器〉

- ・他の治療器と同時に使用しないでください。

〈適用対象(患者)〉

次の人は、使用前に医師に相談してください。

- ・悪性腫瘍のある人。
- ・心臓に障害のある人。
- ・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
- ・温度感覚喪失が認められる人。
- ・皮膚に感染症及び/又は創傷のある人。
- ・安静を必要とする人。
- ・体温38℃以上(有熱期)の人。例1:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。  
例2:衰弱しているとき。
- ・ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]患者の人。

〈ご使用前の注意〉

- ・時計、磁気カード、携帯電話などの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- ・電源プラグは容易に離脱しないよう、正しく確実にコンセントに接続してください。
- ・タイマースイッチが、正常に作動することを確認してください。
- ・しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常かつ安全に作動することを確認してください。
- ・専用ケースを使用する場合、ケースに異物が付着していないことをご確認のうえご使用ください。

〈ご使用中の注意〉

- ・ご使用は1回15分以内です。同一ヶ所への連続使用はしないでください。
- ・機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- ・停電のときは直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・機器には水分(水やお茶等)がかかからないようにしてください。感電や故障の原因になります。
- ・子供や監督が必要とする人は、保護者の監督の下で使用してください。

〈ご使用後及び保管の注意〉

- ・使用後は、タイマースイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。
- ・機器本体、付属品などは、次の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ない所に整理、保管してください。
- ・子供の手の届かない所に保管してください。
- ・機器本体及び付属品の廃棄については、各自治体の定めに従って廃棄してください。

〈機器の故障及び改造に関わる注意〉

- ・故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元にご連絡ください。
- ・機器は、改造又は分解しないでください。

## 【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・暖房器具のそば、日光のあたるところ、ほこりの多いところ、湿気の多いところを避けて保管してください。  
保管条件: 周囲温度 0~45℃

## 【保守・点検に係る事項】

- ・機器を衛生的に保つために、表面のほこりを電気掃除機などで吸い取ってください。  
磁気発生部が汚れたときは、中性洗剤を布に浸して拭き取ってください。シンナー、ベンジンは使用禁止です。
- ・製品の丸洗いはできません。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称 : 株式会社朝日技研工業  
電話番号 : 03-6262-1518  
製造業者の名称 : 株式会社リッコー