

類別:機械器具81 磁気治療器

管理医療機器 一般の名称:家庭用電気磁気治療器(71015000)

販売名 マグスピン そうかい

【警告】

「併用医療機器」

次のような医用電気機器との併用は、影響を与える可能性がありますので、使用しないでください。

・ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。


[誤作動をおこすおそれがあります。]

・脳せき(脊)髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき(脊)髄液を腹くう(腔)にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき(脊)髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

[誤作動をおこすおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

〈各部の名称及び働き〉

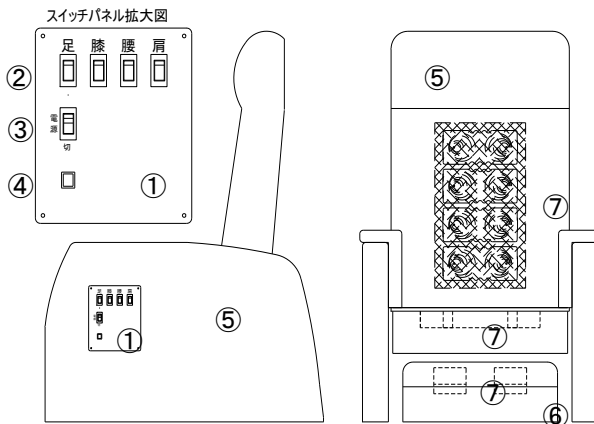

- ① スイッチパネル
電源のON/OFF、治療部位の選択等の操作を行います。
- ② タイマースイッチ
治療部位を選択し、治療を開始する時に押します。
- ③ 電源スイッチ
電源のON/OFFを行います。
- ④ 過電流保護機能付きスイッチ
過電流が流れた場合、動作して電流を止めます。
- ⑤ 椅子
磁気発生部が組み込まれ、座って治療します。
- ⑥ オットマン
足用の磁気発生部が2個取付可能。
- ⑦ 磁気発生部
ここから交流磁気が発生します。(9ヶ所)

〈動作原理〉

鉄心上に巻いた巻線に交流電流を通電することにより、両磁極間の空間に交流磁束流を発生させ、患部に磁束流を注ぐことにより治療効果を与える椅子型の磁気治療器である。安全装置として30分電子タイマー、温度過昇防止装置、温度ヒューズが磁気発生部に内蔵されている。

【使用目的又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。
一般家庭で使用すること。

【使用方法等】

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 椅子に腰を掛けてください。
3. 電源スイッチを「入」にします。
4. 治療したい部位のタイマースイッチを「入」にしてください。(各スイッチのランプが点灯)
5. 30分でタイマーが切れ、ブザーが鳴ります。
6. 使用後は必ず電源スイッチを「切」にして(スイッチのランプ消灯)、電源プラグをコンセントから抜いてください。
* 治療を途中で中止するときは、電源スイッチを「切」にしてください。
7. 椅子の背はリクライニングできます。背を起こすときは、一度前側に倒してから、後側に水平まで倒し、それから好みの角度にひきあげてください。
8. 電流が流れ過ぎた場合、過電流保護機能付きスイッチが動作し電源が止まります。電源スイッチとタイマースイッチを「切」にしてから、キャップを開けて過電流保護機能付きスイッチを押します。もう一度過電流保護機能付きスイッチが動作した場合は、機器に異常がありますので、勝手にいじらず修理を依頼してください。

【使用上の注意】

〈使用環境、使用条件〉

- ・浴室などの湿度の高いところでは使用しないでください。
- ・AC100V以外では使用しないでください。
- ・使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家にご相談ください。
- ・同梱されている、付属品以外は使用しないでください。

〈併用医療機器〉

- ・他の治療器と同時に使用しないでください。

〈適用対象(患者)〉

次の人は、使用前に医師に相談してください。

- ・悪性腫瘍のある人。
- ・心臓に障害のある人。
- ・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
- ・温度感覚喪失が認められる人。
- ・皮膚に感染症及び/又は創傷のある人。
- ・安静を必要とする人。
- ・体温38℃以上(有熱期)の人。例1:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
例2:衰弱しているとき。
- ・ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]患者の人。

〈ご使用前の注意〉

- ・時計、磁気カード、磁気テープ、キャッシュカード、携帯電話等の磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- ・電源プラグは容易に離脱しないよう、正しく確実にコンセントに接続してください。
- ・電源スイッチ、タイマースイッチが、正常に作動することを確認してください。
- ・しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常かつ安全に作動することを確認してください。

〈ご使用中の注意〉

- ・ご使用は1回30分以内です。同一ヶ所への連続使用はしないでください。
- ・機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- ・停電のときは直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・機器には水分(水やお茶等)がかからないようにしてください。感電や故障の原因になります。
- ・子供や監督が必要とする人は、保護者の監督の下で使用してください。

〈ご使用後及び保管の注意〉

- ・使用後は、タイマースイッチを元の位置に戻した後、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。
- ・機器本体、付属品などは、次の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ない所に整理、保管してください。
- ・機器本体及び付属品の廃棄については、各自治体の定めに従って廃棄してください。

〈機器の故障及び改造に関わる注意〉

- ・故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元にご連絡ください。
- ・機器は、改造又は分解しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・暖房器具のそば、日光のあたるところ、ほこりの多いところ、湿気の多いところを避けて保管してください。
- 保管条件： 周囲温度 0～45℃

【保守・点検に係る事項】

- ・機器を衛生的に保つために、表面のほこりを電気掃除機などで吸い取ってください。
- ・磁気発生部が汚れたときは、中性洗剤を布に浸して拭き取ってください。シンナー、ベンジンは使用禁止です。
- ・製品の丸洗いはできません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称 : 株式会社朝日技研工業
電話番号 : 03-6262-1518
製造業者の名称 : 株式会社リッコー